

Q-Check® SARS-CoV-2 Antijen Saptama Hızlı Yanal Akış Testi



SYNBIOTIK



info@desteklab.com

SARS-CoV-2 Antijen Tespiti için kullanılan Hızlı Yanal Akış Testi, COVID-19 olduğundan şüphelenilen kişilerden doğrudan alınan nazofaringeal ve orofaringeal sürüntü örneklerinde SARS-CoV-2'ye özgü bir antijen olan Nükleokapsid proteinin (N proteini) varlığını tespit etmek için tasarlanmış güvenilir bir immünokromatografik testtir.

- Yüksek doğruluk
 - Yüksek hassasiyet
 - >%97 klinik özgüllük
 - >90% klinik duyarlılık
 - 20 dakikada sonuç
 - Hızlı, kullanımı kolay ve güvenli
 - CE IVD onaylı
- Varyantlara karşı hassasiyet



B.1.1.617.2
SARS-CoV-2
Delta varyant



B.1.1.529
SARS-CoV-2
Omicron varyant




Kit İçeriği

- Test kaseti (silika içeren folyo poşette tekli) (25 adet)
- Tek kullanımlık örnek solüsyonu 400 uL(25 adet)
- Steril sürüntü çubuğu (25 adet)

Test Prosedürü



Boğazınızdan sürüntü çubuğu ile tükürük örneği aldıktan sonra, aynı çubuk ile burnunuzun iç tarafından örnek alınız

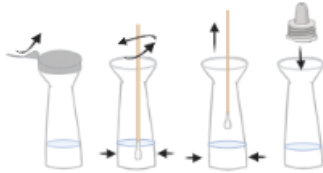

Sürüntü çubuğunu Örnek Tüpü içine koyarak, çubuğu 5 defa çeviriniz ve 30 saniye bekleddikten sonra tekrar karıştırınız




Kaset üzerindeki örnek kuyusuna 2-3 damla test örneği damlatınız



15-20 dakika bekleyin ve sonuçları değerlendirin

Sonuçların Yorumlanması

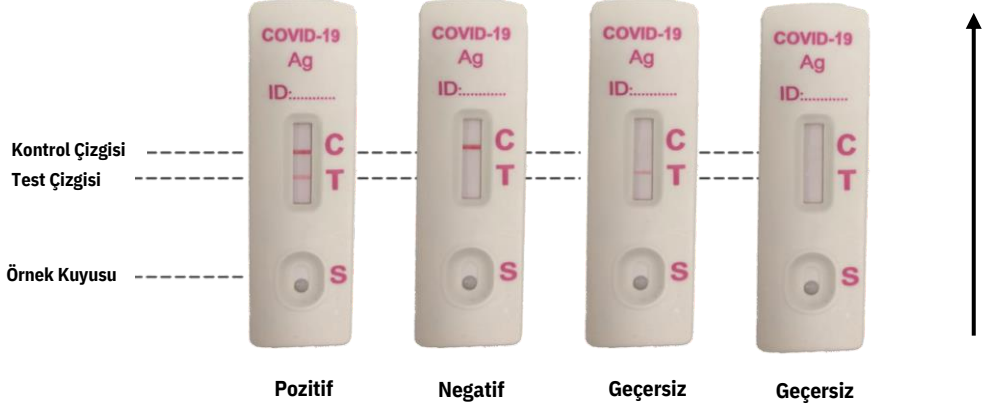

Test sırasında numune, test şeridindeki SARS-CoV-2 antikor kaplı partiküllerle reaksiyona girer. Karışım daha sonra kapiler hareketle kromatografik olarak membran üzerinde ok yönünde hareket eder.

Numunede SARS-CoV-2 varsa, antikor konjuge partiküller T çizgisinde birikerek gözle görülebilen kırmızı bir çizgiye yol açar. Test, gözle görülebilen C çizgisinin oluşmasıyla doğrulanır.

Ürün	Katalog Numarası
Q-Check® SARS-CoV-2 Antijen Saptama Hızlı Yanal Akış Testi	QCH-0002



Dealer:



Inovasyon Ürünleri ve Laboratuvar Sistemleri



SYNBIOTIK

75. Yıl(OSB) Mh. 3. Cadde Yeni Estim Sitesi No: 12/G Odunpazarı - Eskişehir TURKEY

www.desteklab.com

info@desteklab.com

0 222 340 40 28

